

コラントッテ TAO ネックレス

取扱説明書



Colantotte

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉

Colan Totte

製造販売元 株式会社コラントッテ
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

MA01_R16

～TAO～

TAOとは中国哲学で説かれている

「道」を表しています。

宇宙自然の普遍的法則や存在の根源、
美や真実の根元などを広く意味する言葉です。

すべての真理と説かれ、
悠然と変わることなく存在し、
揺ぎないもの。

それがTAOなのです。

■コラントッテ TAO ネックレスは医療機器です。

コラントッテ TAO ネックレスは
樹脂コーティング磁石を、独自の
N極S極交互配列で配置した
医療機器です。



独自のN極S極交互配列

医療機器として認証されている
本物の健康ギアの効果を、体感
できます。


■磁気力で血行改善、コリを緩和。

ネックループ全体には磁気コラントッテ独自の
N極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。
これにより磁力の広がり立体的で広範囲に動きかける
ことができます。

コラントッテ TAO ネックレスは着けているだけで首
や肩などのコリに効きます。

■お手入れ方法・その他 ※FINO、スリム ARIEは別ページを参照
経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は…
【ループ】金属部分を選んで、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。
【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。
ループ、金属部分ともに、手洗後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しないようご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が傷む恐れがあります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 着脱の際は、必ず留具の根元とネックループを持って行ってください。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないでください。留具の着脱テストは行っておりますが、ご使用の仕方によっては、破損のおそれがありますので取り外しにはご注意ください。

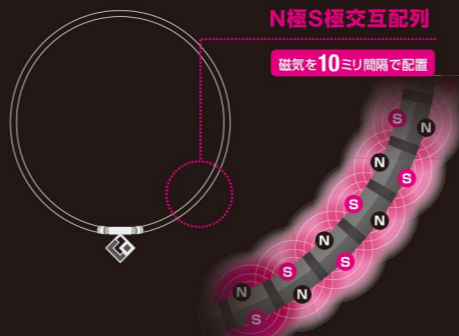

■製品仕様

Spec : 磁気を10mm間隔でN極S極交互配列
Material: <コラントッテ TAO ネックレス
RAFFIシリーズ / AURAシリーズ / ARANシリーズ / VEGA II /
スリム ARIE>
樹脂コーティング磁石、ステンレス
<コラントッテ TAO ネックレス FINO>
樹脂コーティング磁石、ステンレス、ポリエステル

■スリム ARIE お手入れ方法・その他

経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は…
【ループ】金属部分を選んで、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。
【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。
ループ、金属部分ともに、手洗後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しないようご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が傷む恐れがあります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 着脱の際は、必ず留具の根元とネックループを持って行ってください。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないでください。
- 軽い力で着脱できる磁石式の留具のため、ジョイント外れによる落下にご注意ください。

■ジョイント部分の取り外し方

●TAO ネックレス RAFFI シリーズ

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



●TAO ネックレス AURA、ARANシリーズ

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



●TAO ネックレス VEGA II

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



■上記シリーズの留め方

凹側留具に平行に凸側留具をカチッと奥まで押し込んで
ください。(少し固めになっております)

■FINO お手入れ方法・その他


経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は、汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。手洗後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 繊細なポリエステル糸を使用して風合いを出していますので乱暴な取り扱いはお避けください。繊維が毛羽立ちやすくなります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 取り外しの際は必ず留具を持って上下に外してください。
- 留め具のネックループ繊維への影響を防ぐために留具本体が動きやすくなっているため、その際は正常な位置に留具を戻してご使用ください。
- 運動・衝撃などにより留具が外れる場合がございますので、ご注意ください。

■ジョイント部分の取り外し方

●TAO ネックレス FINO

必ずジョイント金具を持って
右記のように上下に引っ張ってください。

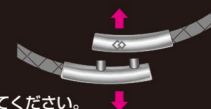

●TAO ネックレス 首の後ろにジョイントがある製品

留具の根元とループを持って左右に引っ張ってください。



●TAO ネックレス スリム ARIE 留具の根元とループを持ち矢印の方向へ引っ張ってください。



■TAO ネックレス スリム ARIEの留め方

ジョイントの突起部をカチッと奥まではめてください。