
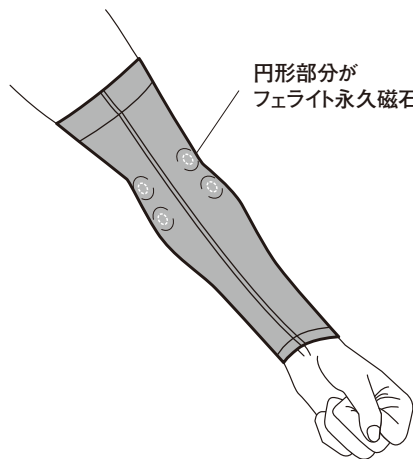


# エルボーサポーター E-Sleevesのご使用方法


-  マークプリントのある方が外側です。
- 縫い目を中心に、ひじ関節の内側に磁石部分がくるように調整してください。
- 着用の際、つめをたてたり、引っ張りすぎると、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 左右違いがありませんので、どちらにも着けられます。

内側

円形部分が  
フェライト永久磁石



外側

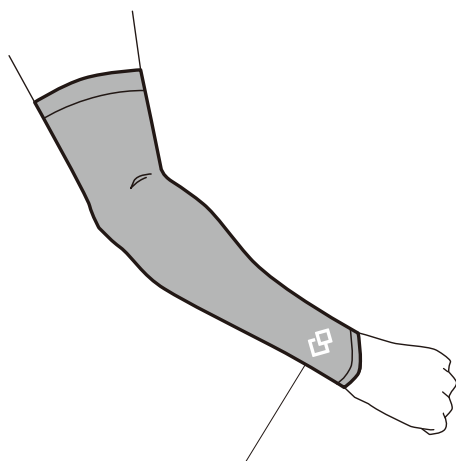

◇マークが腕の外側に  
くるように装着してください。

## < 取扱説明 >

- 洗濯は中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気をきり、形を整えて陰干しして完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。ぬれたまま重ね置きすると淡色部や他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤・柔軟剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- 水洗いで色落ち、移染の恐れがありますので他の物と分けて洗ってください。
- ドライクリーニングの溶剤でプリントが剥がれることがありますので、ドライクリーニングは避けてください。
- 高温のものに近づけることは避けてください。
- 筋肉痛緩和剤と併用はお避けください。

